

LifeStream™

Stent vascular revestido expansível por balão




LifeStream™

Stent vascular revestido expansível por balão

Indicado para o tratamento de lesões ateroscleróticas em artérias ilíacas externas e comuns

Stent revestido com balão expansível eletropolido de aço inoxidável 316L, encapsulado entre **duas camadas de ePTFE** (politetrafluoroetileno expandido).

Sistema de liberação *over-the-wire* (sobre o fio) com um balão não complacente.

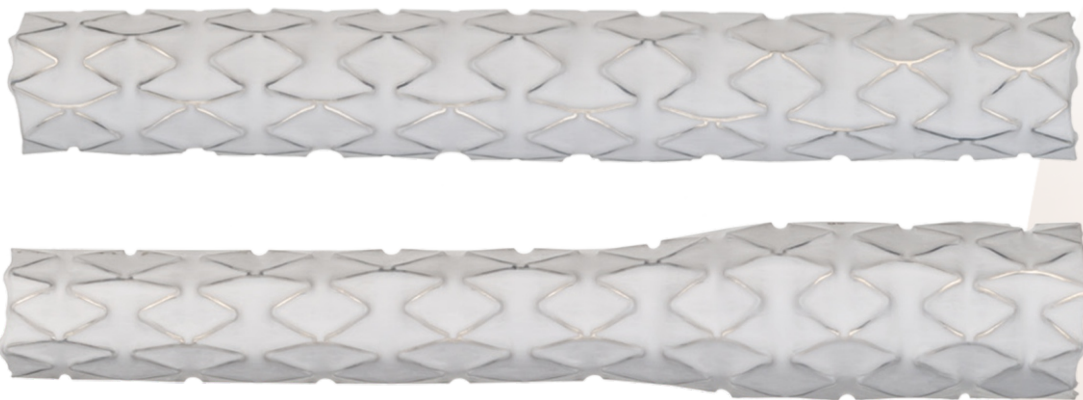

Aposição total da parede com pós dilatação.

Os dispositivos de **5-8 mm podem ser dilatados** posteriormente com balões de **diâmetros inferiores ou iguais a 10 mm**.

Os dispositivos de **9-12 mm podem ser dilatados** posteriormente com balões de **diâmetros inferiores ou iguais a 12 mm**.


Se o stent revestido não tiver atingido uma aposição total da parede, deverá ser efetuada uma pós-dilatação com um balão de tamanho apropriado.

Precisão na entrega

Tecnologia de balão **não complacente**

Design no balão que **auxilia o posicionamento** do stent

Encurtamento controlado
durante a expansão

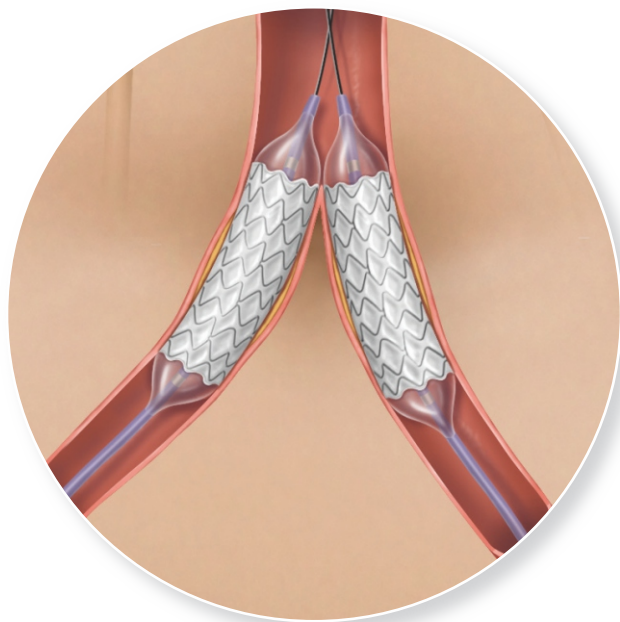


Implantação **exata** do stent revestido

Sistema de entrega 5.4Fr e 6.5Fr

**Design que facilita a navegação
e cruzamento das lesões**

Cateteres de duplo e triplo lúmen

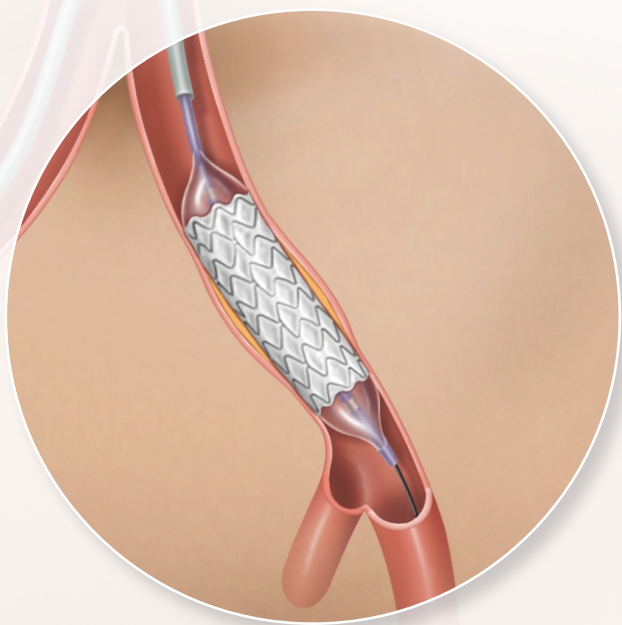

Material e design do implante

Stent

Aço inoxidável 316L

Material do revestimento

Duas camadas de ePTFE que encapsulam o stent

Especificações

Comprimentos da haste

80 cm e 135 cm

Fio-guia

0,035"

Compatibilidade da bainha introdutora

Medidas e perfil do cateter

	16	26	37/38 ²	58
5				
6		6F		
7				
8			7F	
9				
10				8F
12				

Diâmetro da haste

- Duplo Lúmen, 5.4 Fr
- Triplo Lúmen, 6.5 Fr

Quadro de conformidade do balão

		Diâmetro						
		5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
ATM	8	5,1	6,0	7,1	8,2	9,1	10,1	12,0
	9	5,1	6,0	7,2	8,3	9,2	10,2	12,0
	10	5,1	6,1	7,2	8,4	9,2	10,2	12,1
	11	5,2	6,1	7,3	8,4	9,3	10,3	12,2
	12	5,2	6,2	7,3	8,5	9,4	10,4	12,3

*Informação consta na embalagem do produto



Precisão no implante

LifeStream™

Stent vascular revestido expansível por balão

Comprimento do cateter de 135 cm / Fio-guia de 0,035" compatível			
Diâmetro do Stent expandido (mm)	Comprimento do Stent comprimido (mm)	Introdutor recomendado	Código do produto
5	26	6F	LSM1350526
	37	6F	LSM1350537
6	16	6F	LSM1350616
	26	6F	LSM1350626
	37	6F	LSM1350637
	58	7F	LSM1350658
7	16	6F	LSM1350716
	26	6F	LSM1350726
	37	6F	LSM1350737
	58	7F	LSM1350758
8	16	7F	LSM1350816
	26	7F	LSM1350826
	37	7F	LSM1350837
	58	7F	LSM1350858
9	38	7F	LSM1350938
	58	7F	LSM1350958
10	38	8F	LSM1351038
	58	8F	LSM1351058
12	38	8F	LSM1351238
	58	8F	LSM1351258

Comprimento do cateter de 80 cm / Fio-guia de 0,035" compatível			
Diâmetro do Stent expandido	Comprimento do Stent comprimido (mm)	Introdutor recomendado	Código do produto
5	26	6F	LSM0800526
	37	6F	LSM0800537
6	16	6F	LSM0800616
	26	6F	LSM0800626
	37	6F	LSM0800637
	58	7F	LSM0800658
7	16	6F	LSM0800716
	26	6F	LSM0800726
	37	6F	LSM0800737
	58	7F	LSM0800758
8	16	7F	LSM0800816
	26	7F	LSM0800826
	37	7F	LSM0800837
	58	7F	LSM0800858
9	38	7F	LSM0800938
	58	7F	LSM0800958
10	38	8F	LSM0801038
	58	8F	LSM0801058
12	38	8F	LSM0801238
	58	8F	LSM0801258

LifeStream BX Endoprótese Vascular - RMS: 80689090092

bd.com



©2023 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA. Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com. Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contra-indicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso. Fonte das imagens: Banco de imagens BD. BD-83167