



Sistema de controle de temperatura

# Arctic Sun™ 5000

Guia rápido de referências




# Guia de tamanhos


## Tamanhos

- NP Neonatal
- SU Infantil Universal
- XXS Extra Extra Pequeno
- XS Extra Pequeno
- S Pequeno
- M Médio
- L Grande
- L+U Adulto Universal

### Paciente do sexo feminino

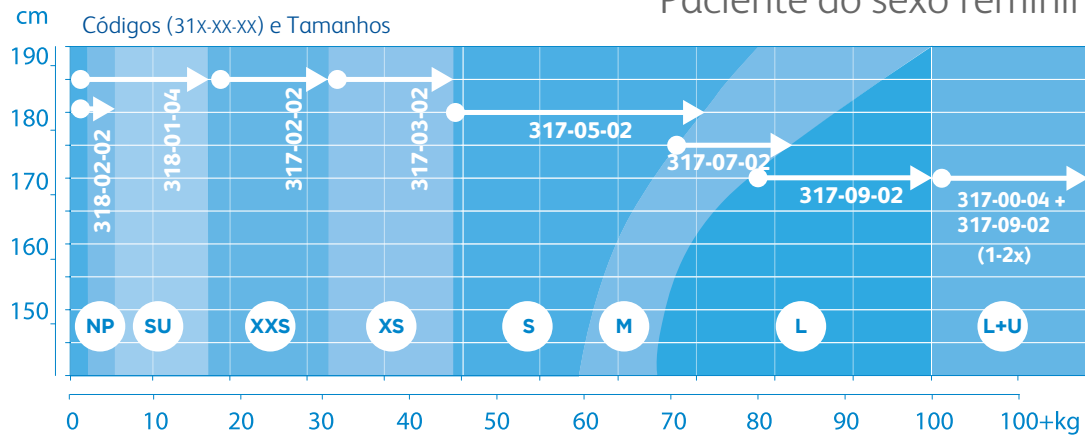


### Paciente do sexo masculino

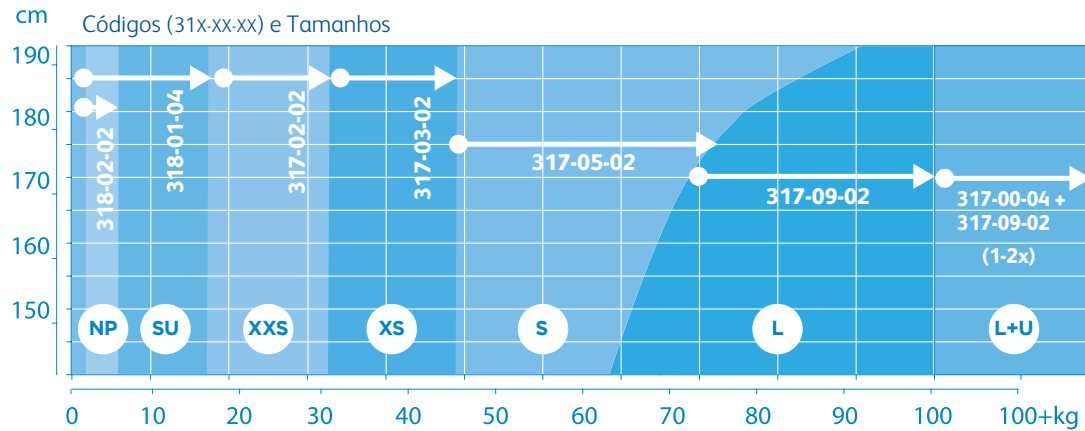

# Peso do Pad

Código e Tamanho	318-02-02 Neonatal	318-01-04 Infantil Universal	317-02-02 Extra Extra Pequeno	317-03-02 Extra Pequeno	317-05-02 Pequeno	317-07-02 Médio	317-09-02 Grande	317-00-04 Adulto Universal
Pad vazio	0.47 kg	0.11 kg	0.63 kg	0.83 kg	1.41 kg	1.45 kg	1.64 kg	0.23 kg
Pad com Água	0.68 kg	0.17 kg	0.83 kg	1.13 kg	2.09 kg	2.14 kg	2.41 kg	0.36 kg


## Posicionamento dos Pads

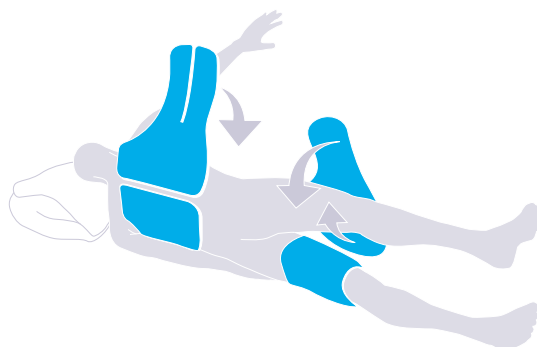

1. Selecione o tamanho apropriado dos Pads e aplique-os na pele seca e intacta.
2. Vire o paciente para o lado (direita ou esquerda).
3. Selecione o Pad correspondente ao tronco (verifique se é esquerdo ou direito), retire o papel pad e alinhe-o paralelamente à coluna do paciente, envolva-os em direção ao abdômen.
4. Selecione o Pad correspondente à coxa (verifique se é esquerdo ou direito) e envolva a coxa.
5. As linhas de alimentação do Pad devem estar na posição anterior e apontar para o pé da cama.
6. Afaste-se do paciente e repita.

Após o término da terapia, os Pads devem ser esvaziados e removidos lenta e suavemente, sem puxões.




## Informação dos Pads

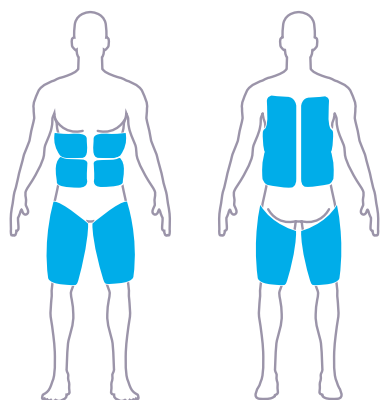


- Recomenda-se substituir os Pads a cada 5 dias.
- Colocar os Pads apenas sobre a pele saudável e limpa. Remover quaisquer cremes ou loções da pele do paciente antes da aplicação dos Pads.
- Radiolúcido e seguro para ressonância magnética a 7,0 Tesla, tomografia computadorizada, raio-X e laboratório de cateterismo.

# Como encher o dispositivo

- Use apenas água esterilizada.
- Quatro litros de água serão necessários para encher o reservatório.
- Acrescente à água uma ampola da Solução de Limpeza do Sistema.
- Na tela de Seleção da Terapia, pressione o botão de Normotermia ou Hipotermia.
- Na tela Terapia de Hipotermia ou de Terapia de Normotermia, pressione o botão Encher Reservatório.
- Siga as instruções na tela.

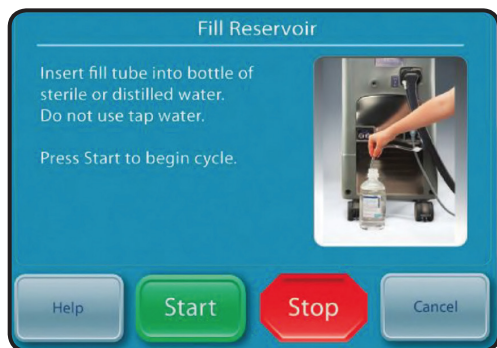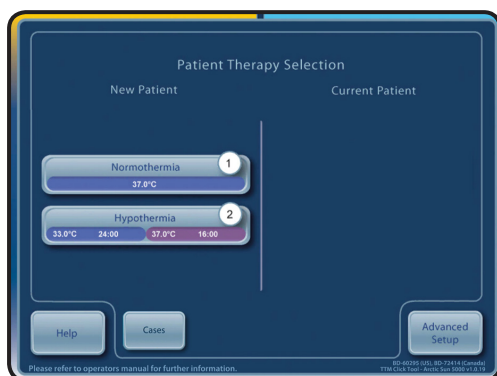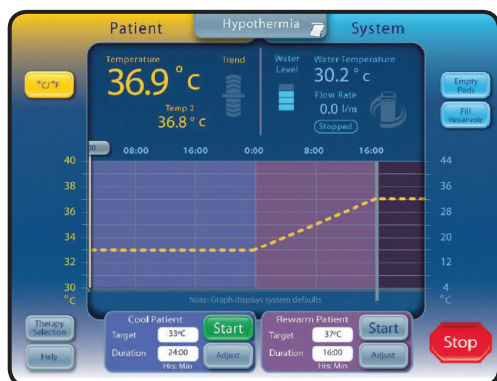


Tubo de enchimento

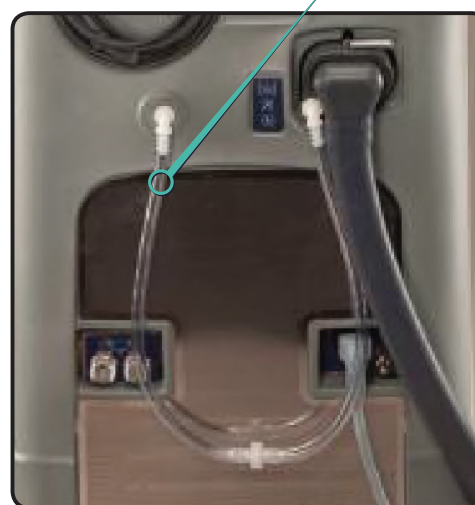

# Iniciando terapia


1

Selecione a opção de tratamento:  
Normotermia ou Hipotermia

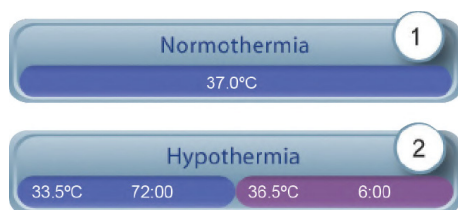


2

Verifique as configurações do protocolo de acordo com sua instituição.  
Pressione "Iniciar"

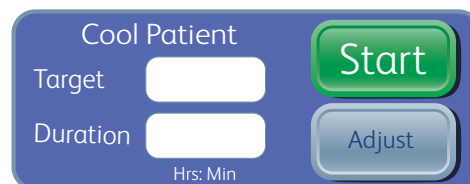

- A** Temperatura do paciente
- B** Temperatura da água
- C** Temperatura alvo

## Conectando os Pads

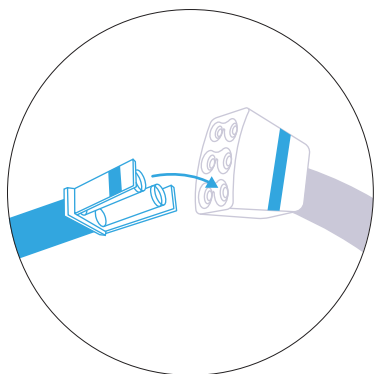

- Conecte a linha de cada Pad ao bloco receptor na extremidade da mangueira.
- Certifique-se de que o lado do conector branco se conecta ao lado azul.
- Insira o conector passivamente, sem tocar nas abas durante a inserção; você ouvirá um "clique".

## Transporte do paciente e fim da terapia



### Desconectando os Pads


- Pressione "Parar".
- Pressione "Esvaziar os Pads".
- Quando os Pads estiverem completamente vazios, aperte as abas e puxe para remover os conectores do bloco receptor.

# Retomando a terapia após o transporte do paciente

Conecte os Pads ao bloco receptor na extremidade da mangueira


Se o dispositivo estiver ligado:

- Verifique as configurações do protocolo (ajuste se necessário)
- Pressione "Iniciar"

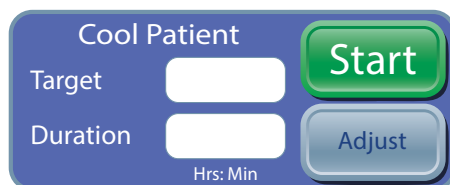

Se o dispositivo estiver desligado:

- Ligue o equipamento
- Pressione "Continuar com o paciente atual"
- Verifique as configurações do protocolo (ajuste se necessário)
- Pressione "Iniciar"

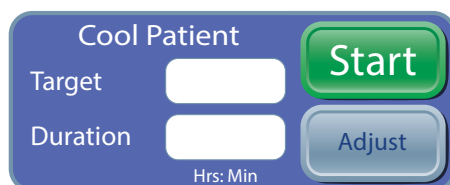

# Sistema de controle de temperatura Arctic Sun™ 5000

## Informação para pedidos

### BRASIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5000-01-05	Arctic Sun™ 5000 230V - Sistema de controle de temperatura
317-00-04	ArcticGel™ Pad Universal Adulto Kit 4PADs
317-02-02	ArcticGel™ Pad Extra Extra Pequeno 2PADs
317-03-02	ArcticGel™ Pad Extra Pequeno Kit 2PADs
317-05-02	ArcticGel™ Pad Pequeno Kit 2PADS
317-07-02	ArcticGel™ Pad Médio Kit 2PADS
317-09-02	ArcticGel™ Pad Grande Kit 2PADS
318-01-04	ArcticGel™ Pad Univers Infantil Kit 4PADs
318-02-02	Neonatal ArcticGel™ Pad - 2/caixa

### INFORMAÇÕES DE CONTATO

Rua Alexandre Dumas 1976, Santo Amaro; São Paulo, Brasil.  
Tel: +55 (11) 5185-9833

Este GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA não substitui a manutenção do produto ou as Instruções de Uso.

Consulte as bulas e rótulos dos produtos para obter indicações, contra-indicações, precauções, advertências, perigos, cuidados e instruções de uso.

#### Avisos:

Não use o Sistema de controle de temperatura Arctic Sun™ 5000 na presença de agentes inflamáveis, pois pode ocorrer explosão e/ou incêndio.

Não use instrumentos cirúrgicos de alta frequência ou cateteres endocárdicos enquanto o Sistema de controle de temperatura Arctic Sun™ 5000 estiver em uso.

[www.bd.com/pt-br](http://www.bd.com/pt-br)

©2025 BD. Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA. Para mais informações, contacte à BD em SAC: 0800 055 5654 ou [cs\\_brasil@bd.com](mailto:cs_brasil@bd.com). Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências e cuidados.  
BD-92866

